



**AirHeel™**

ORTÉZA HLEZENÍ S PNEUMATICKÝM VYPODLOŽENÍM



## ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TÉTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

### ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Pomůcka Aircast AirHeel™ je určena k léčbě plantární fasciitidy a zánětu Achillovy šlachy.
- Pomůcka Aircast AirHeel™ s výztuží je určena k léčbě plantární fasciitidy, zánětu Achillovy šlachy a chronické nestability kotníku.

### KONTRAIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

### VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Ve **vysoké nadmořské výšce** se tlak ve vzduchových polštářcích zvýší nad optimální úroveň. Upravte tlak ve vzduchových polštářcích utahením nebo povolením pásků.

**POKUD SE BĚHEM POUŽÍVÁNÍ TÉTO POMŮCKY OBJEVÍ BOLEST, OTOK, ZMĚNA CITLIVOSTI NEBO JINÉ NEOBVYKLÉ REAKCE, IHNEDE SE OBRÁTEŤ NA SVĚHO LÉKAŘE.**

### POKYNY K NAsAZENÍ:

POMŮCKA AIRCAST AIRHEEL™:

Navlékněte si ponožku. Vložte nohu do ortézy prsty napřed. Umístěte patu do otvoru v zadní části ortézy. Umístěte vzduchový polštářek pro podporu Achillovy šlachy nad Achillovu šlahu. Výšku vzduchového polštářku na šlaše můžete upravit tak, že ortézu uvolníte a poté znovu umístíte na správné místo. Položte chodidlo na podlahu a upevněte kotníkový pásek. Ujistěte se, že vzduchový polštářek pro podporu chodidla je umístěn pod klenbou nohy. Aby byla ortéza správně umístěna, utáhněte nebo povolte kotníkový pásek.

POMŮCKA AIRCAST AIRHEEL™ S VÝZTUŽÍ:

Postupujte podle výše uvedených pokynů k nasazení pomůcky AirHeel™. Ujistěte se, že výztuže jsou správně umístěny podél vnitřní a vnější strany kotníku tak, aby poskytovaly dostatečnou oporu.

### ÚDRŽBA:

- Perte ručně ve studené vodě o teplotě 30 °C s použitím jemného mýdla. Sušte volně na vzduchu.

### SLOŽENÍ:

- Pletenina: polyamid, elastin, polyester
- Výztuhy: silikon
- Vnitřní povlak: froté
- Pásek: polyamid, polyuretan, polyester, přírodní kaučuk, elastan, polypropylen



NEOBSAHUJE PŘÍRODNÍ PRYŽOVÝ LATEX

### URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

**ZÁRUKA:** DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

**OZNÁMENÍ:** PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SÍLY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ A POUŽITY NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

## Air Heel™/Air Heel™ s výztuží

