

NASAZENÍ MANU-CAST® ORGANIC FITTING THE MANU-CAST® ORGANIC



KROK 1

Rozepněte suché zipy MANU-CAST ORGANIC.

STEP 1

Open the Velcro fasteners of the MANU-CAST® ORGANIC.



KROK 2

Vsuňte ruku do ortézy.

STEP 2

Pull the brace over the hand.



KROK 3

Anatomicky predtvarovaná dlahá se opírá o vnitřní stranu dlaně.

STEP 3

The anatomically pre-shaped lattice frame rests against the inside of the hand.



KROK 4

Horní část ortézy musí být umístěna mezi palcem a ukazováčkem.

STEP 4

The upper bar must lie between the thumb and the index finger.



KROK 5

Uzavřete suché zipy priměřenou silou. Zápěstní páska se obtočí kolem zápěstí a ortézy.

STEP 5

Close the Velcro fasteners with measured tension. The wrist strap is wrapped circularly around the wrist and brace.



KROK 6

Ortéza je správně nasazena, když předtvarovaná dlaha těsně přiléhá k dlani, zápěstí a předloktí.

STEP 6

MANU-CAST® ORGANIC is properly tightened when the anatomically preshaped mesh frame fits snugly against the palm, wrist and forearm.



KROK 7

Chcete-li ortézu sejmout, tozepněte pásky se suchými zipy a druhou rukou ortézu sundejte.

STEP 7

To remove MANU-CAST® ORGANIC, open the circular Velcro straps and pull the brace off with the other hand.

